

 <p>Servizio Sanitario della Toscana S.C. Medicina Interna H Valle del Serchio</p>	<p>SCHEDA RISCONTRO VERIFICA FUNZIONALE VELA</p>	<p>MR MGB 020 Rev. 0 del 03/08/2016 Pag. 1 di 1</p>
---	---	---

1. Verificare pulizia del ventilatore e componenti
2. Confermare la corretta installazione della valvola d'espiazione e del diaframma
3. Entrare in test verifica
4. Confermare il corretto funzionamento delle spie luminose dei LED e del pannello anteriore
5. Verificare volume allarme
6. Controllare il circuito di ventilazione e la corretta installazione di tutti i suoi componenti
7. Eseguire il test di tenuta
8. Uscire dallo stato di STAND-BY ed impostare il ventilatore su nuovo Paziente (medico)
9. Esecuzione da parte del medico del controllo sulla funzionalità manuale del ventilatore



etichetta